


| | | | |
|--|--|---------------------|---------|
|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Código do Documento | Página |
| | | POP.DT.011 | 1 / 2 |
| USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) | | Especialidade | Revisão |
| | | DIREÇÃO TÉCNICA | |

Objetivo





PADRONIZAR O USO DO DEA

QUANDO USAR ?


Em todo paciente com suspeita de parada cardíaca:

- I. DESMAIADO (ou inconsciente: não responde quando chamado)
- II. NÃO RESPIRA (ou a respiração está parecendo em AGONIA/GASPING)
- III. SEM PULSO (se você é leigo, usar mesmo sem palpar o pulso)

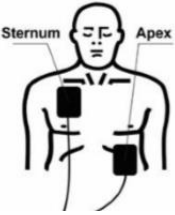*Não deve ser usado em paciente consciente, respirando bem e com pulso

| COMO USAR | | |
|--|---|---|
| Responsável | Ação | |
| <p>Treinado em BLS ou qualquer profissional de saúde</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte o cabo da energia (funciona com bateria) 2. Abra a camisa, retire ou corte a camisa do paciente 3. Seque a pele e veja se é necessário raspar pelos antes de conectar as pás adesivas nos locais indicados (há um barbeador no kit) 4. Colar as pás adesivas no tórax do paciente conforme o desenho: <ol style="list-style-type: none"> a. A com a cor VERMELHA escrito RA vai ser colada do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA | |
| |  | <ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> b. A com a cor VERDE escrito LL vai ser colada debaixo da AXILA, perto onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal) |
| | |  |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Encaixar o cabo das pás no encaixe lateral do aparelho (identificado pelo número 1 na foto): |
| | |  |


| Elaborado por: | Aprovado por: | Validado por: |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA | TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM | MARCOS PAVIONE DIRETOR TÉCNICO |
| Data: 24/02/2021 | Data: 24/02/2021 | Data: 24/02/21 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------|
|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Código do Documento | Página |
| | | POP.DT.011 | 2 / 2 |
| USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) | | Especialidade | Revisão |
| | | DIREÇÃO TÉCNICA | |

| | | |
|---|---|---|
|  | 6. Ligar o aparelho, apertando o botão VERDE DURANTE 3 SEGUNDOS |  |
| | 7. Manter o equipamento a uma distância segura: 20 cm do paciente e 20 cm de você | |
| | 8. O equipamento iniciará uma série de COMANDOS que DEVEM SER SEGUIDOS: | |
| “AFASTE-SE DO PACIENTE” ou “MANTENHA-SE AFASTADO” Neste momento, ninguém deve tocar no paciente | |  |
| “ANALISANDO” ou “ANALISANDO O RITMO” Ninguém deve tocar no paciente | | |
| “TRATAMENTO INDICADO” Significa que o paciente deverá receber uma desfibrilação (choque = carga 150 J). APERTAR IMEDIATAMENTE O BOTÃO LARANJA NÃO TOCAR NO PACIENTE | |  |
| “TRATAMENTO NÃO INDICADO” Significa que não precisa de choque. Deverá voltar imediatamente a massagem cardíaca. | | |
|  | “REALIZE A RCP” Orientação para equipe retomar imediatamente a massagem cardíaca externa 30 massagens para 2 ventilações (se não for ventilar, ficar somente massageando) | |
| OBS.: pode-se acompanhar o ritmo, comandos e FC na tela por escrito: |  | |

OBSERVAÇÕES

- a) POSSO USAR EM CRIANÇAS? SIM. O ideal é que seja usado um desfibrilador (disponível na UTIN), mas em caso emergencial pode ser utilizado este. COMO POSICIONAR AS PÁS EM CRIANÇAS? Posicionar com uma distância de 3 cm entre uma e outra (ou uma na frente e outra nas costas se a criança for muito pequena)
- b) CUIDADOS APÓS O USO:
- REPOR NO CARRINHO DO DEA: 1 Ambu adulto, 1 Máscara facial adulto, 1 Látex 3 metros, 1 Um barbeador descartável
 - RECONECTAR NA TOMADA APÓS O USO (manter sempre conectado para carregar bateria)**

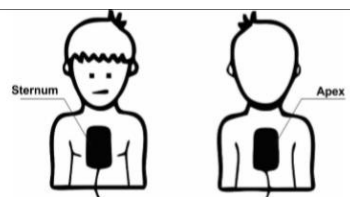

Referências bibliográficas

Manual do equipamento e diretrizes de reanimação AHA 2020

| Elaborado por: | Aprovado por: | Validado por: |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| MARCOS ALVES PAVIONE INTENSIVISTA | TATIANA SANTANA GERENTE DE ENFERMAGEM | MARCOS PAVIONE DIRETOR TÉCNICO |
| Data: 24/02/2021 | Data: 24/02/2021 | Data: 24/02/21 |